

## Gyakori kérdések

### 1 Beindítás után buborékok vannak a víztartályban, viszont nem jön oxigéngáz az oxigénkimenetből. Mi okozhatja ezt?

**Ok:** Nincs megfelelően behelyezve a párasító víztartály tetején lévő gumidugó.

**Hibaelhárítás:** Vegye ki a párasító víztartályt, és helyezze be megfelelően a gumidugót.

### 2 Furcsa szaga van a készülékből jövő oxigéngáznak. Mi okozhatja ezt?

**Ok:** A készülék kezdeti használatakor az összekötőcső és más műanyag alkatrészek kibocsáthatnak valamilyen szagot; ez normális jelenség.

**Hibaelhárítás:** A készülék használata során ez fokozatosan meg fog szűnni; ezt felgyorsíthatja oly módon, hogy néhány alkalommal beáztatja a csövet ecet és meleg víz 1:3 arányú oldatába, majd kiöblíti tiszta vízzel, és hagyja megszáradni jól szellőző helyen.

### 3 A készülék néhány másodpercenként „puffogó” hangot ad ki. Mi okozhatja ezt?

**Ok:** Ez a nitrogén kieresztésének a hangja, amikor a készülék szabályosan működik, tehát nem hibajelenség.

**Hibaelhárítás:** Ez normális jelenség, nem hiba, ezért figyelmen kívül hagyható.

### 4 Miért kell vizet tölteni a készülékbe?

**Ok:** A vízre az oxigén nedvesítéséhez van szükség, hogy ne szárítsa ki az orrát, miközben belélegzi, de a készülék víz hozzáadása nélkül is működtethető.

**Hibaelhárítás:** Tisztított vizet használjon, ami lehet palackozott víz, felforralt és visszahűtött víz, ásványvíz, vagy más tiszta forrásból származó víz. A víztartályt csak a maximális vízszint jelzéséig szabad feltölteni, és javasolt 1-2 naponta cserélni a benne lévő vizet.

### 5 Víz folyik ki az oxigénkimeneten. Mi okozhatja ezt?

**Ok:** (1) A tartályban lévő víz szintje a maximális jelzés fölött van.

(2) Víz van a zöld színű vízgűjtőben, amely a csővezetékbe van beiktatva.

**Hibaelhárítás:** (1) Öntse ki a vizet a víztartályból, indítsa el a készüléket víz nélkül, és csak az után tölts fel újból vízzel, ha már nem folyik víz az oxigénkimenetből.


(2) Öntse ki a vizet a vízgűjtőből.

### 6 Milyen fogyóeszközök szükségesek a készülék használatához?


**Ok:** A készülék használatához nincs szükség fogyóeszközökre; bekapcsolása után rögtön használatba vehető.

**Hibaelhárítás:** Hosszú távú használat során meg kell tisztítani, illetve ki kell cserélni azt a szűrőt, amely a készülék hátulján lévő fehér, henger alakú levegőbemenet mögött található, továbbá ki kell cserélni a víztartály levegőbemeneti/-kimeneti nyílásánál lévő tömítőgyűrűt, amennyiben megsérül.

## Rövid útmutató az otthoni oxigénkoncentrátorhoz

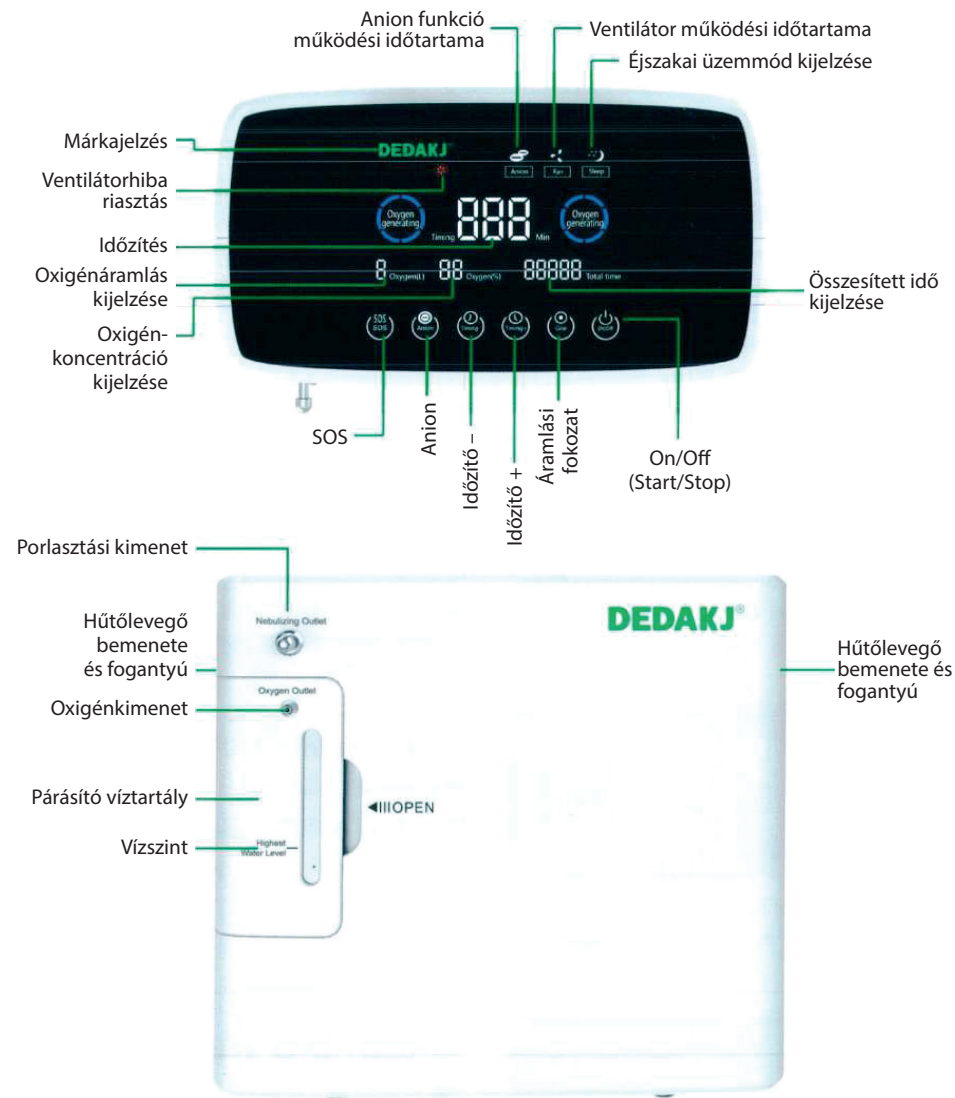


## Előkészületek az első használat előtt

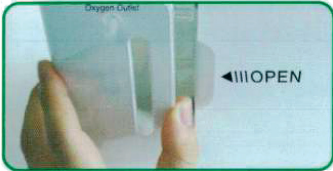


- 1 Balra nyomva vegye ki a víztartályt.



- 2 Húzza ki a víztartály gumidugóját, öntsön a tartályba tisztított vizet, és ügyeljen rá, hogy ne töltse a maximális vízszint jelzése fölé.

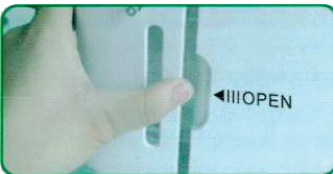


- 3 Helyezze vissza a víztartály gumidugóját, igazítsa egymáshoz a víztartály levegőkimenetét és a megfelelő nyílást, majd tegye vissza a víztartályt az eredeti helyére.

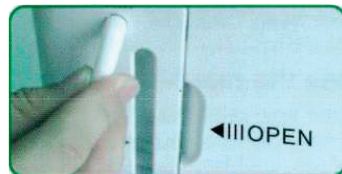


- 4 Csatlakoztassa az oxigéncsövet az oxigénkimenethez.



- 5 Állítsa be az oxigén áramlási sebességét és koncentrációját az igényeinek megfelelő fokozatra.

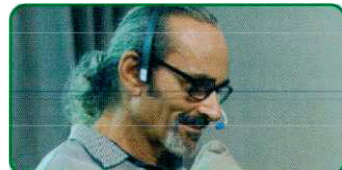


- 6 Ha fejpántos belégzőszerelék használ, azt úgy igazítsa el, hogy a kimenet az orrnyílásaihoz kerüljön.

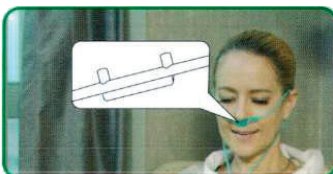


- 7 Ha orrkanülös belégzőszerelék használ, először igazítsa a két kimenetet (vagyis az „orrvillát”) az orrnyílásaiba, majd rögzítse a csövet a gumigyűrűvel.

## A víztartályt és a bemeneti levegőszűrőt hetente egyszer meg kell tisztítani.

### A PÁRÁSÍTÓ VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

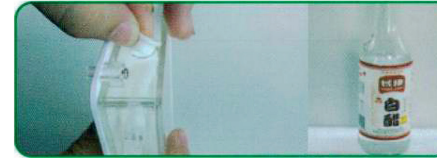

- 1 Húzza ki a gumidugót a víztartályból, öntsön megfelelő mennyiségű 5%-os ecetet a víztartályba, szorosan zárja be a gumidugóval, majd a tisztításhoz rázogassa a víztartályt.

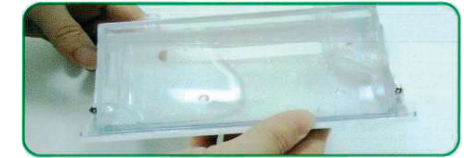

- 2 Ezután töltsön be tiszta vizet, ismét rázogassa, majd többször öblítse ki.

### A LEVEGŐSZŪRŐ TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE



- 1 Ezután töltsön be tiszta vizet, ismét rázogassa, majd többször öblítse ki.




- 2 A csap alá tartva mossa ki a szűrőnyílásból a port és egyéb szennyeződéseket.



- 3 Hagyja megszáradni a szűrőt, majd helyezze be (ha nem szárazon helyezi be, és úgy kezdi használni, csökkenhet az oxigén koncentrációja).

Megjegyzés:  
a szűrő cseréjéhez ugyanúgy kell kivenni a szűrőt, mint a tisztításhoz.

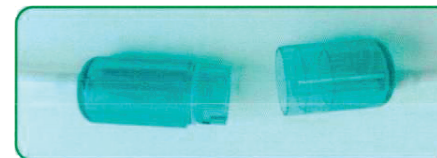

### A VÍZGYŰJTŐ TISZTÍTÁSA

- 1 Elforgatással nyissa ki a vízgyűjtőt, öntse ki az összegyűlt vizet, mossa ki megfelelő mennyiségű 5%-os ecettel, öblítse ki csapvízzel, hagyja megszáradni, végül szerelje vissza a helyére.